

お客様各位

2024年12月

RSL

必ずお読みください。

PAC ワンペーシェント呼吸回路 安全使用(接続方法)のご案内

勤啓、平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申し上げます。

さて、この度「PAC ワンペーシェント呼吸回路」の接続方法につきまして、下記のとおりご案内申し上げます。今後とも、一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

PAC ワンペーシェント呼吸回路と人工気道等の正しい接続方法

1. 対象製品


販売名 : PAC ワンペーシェント呼吸回路

承認番号 : 304ADBZX00026000


一般名称 : 呼吸回路セット

2. 正しい接続方法

ご使用の際は、マスク又は人工気道(カテーテルマウント含む)を本品の「患者口」に接続してご使用ください。

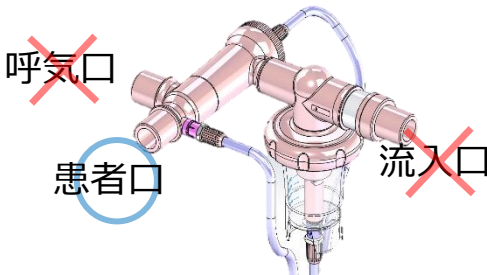

○ : 正しい接続状態

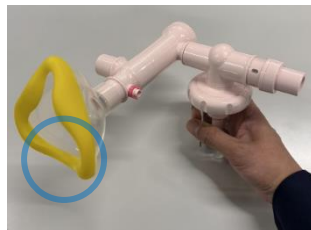

3. 誤った接続方法

マスク又は人工気道等(カテーテルマウント含む)を本品の「呼気口」、「流入口」に誤って接続された場合、呼吸が制限され健康被害が発生する可能性が懸念されます。

×：誤った接続の例（下図参照）

→「呼気口」に接続

※呼気口は呼気の排気用です



→「流入口」に接続

※流入口は外気の流入用です



4. 使用時の注意

本品の「患者口」には「患者」と刻印を行っております。

ご使用時には、必ず本品の「患者口」の刻印確認を実施してください。

併せて「使用前点検」をお願い致します。

以上

製造販売業者：株式会社 RSL

お問い合わせ先：安全管理責任者 真殿 久司

TEL 06-6809-3220